

取扱説明書

製品名：ニードルアトラクター

【警告】

- ・本品は使用後直ちに洗浄し、使用前には滅菌済であることを確認すること。〔感染症を引き起こす可能性がある〕
〔【保守・点検に係る事項】の項参照〕

【禁忌・禁止】

「使用方法」

- ・本品に、打刻等の二次的加工を行わないこと。〔強度が低下し、破損する恐れがある〕
- ・本品を化学薬品に曝すことは避けること。〔腐食による損傷の原因となる〕

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品の構成品の形状、構造は以下のとおりである。



2. 原理

本体に磁石が挿入されており、磁力で針を回収する。

【使用目的又は効果】

手術で使用される針の回収。

【使用方法等】

1. 使用前

- 1) 本品は未滅菌製品であるので、使用する前に適切な方法で洗浄し、滅菌を行ってから使用する。
- 2) 各医療機関により検証され確認された滅菌条件により滅菌を行うこと（滅菌方法については、滅菌装置の添付文書〔取扱説明書〕を必ず参照すること）。

推奨する滅菌方法：高圧蒸気滅菌

2. 使用方法

- 1) 磁石部と皿を重ねた状態で持針器などを用いて皿上に針を近づけると、磁力により針が皿に吸着する。
- 2) 磁石部から皿を持ち上げることで皿上に発生していた磁力が解放され、針の処分が容易になる。その際針が落下しない様に、フタを被せた状態で運ぶことを推奨する。

3. 使用後

使用後は、付着した血液等を除去するため、速やかに洗浄を実施する。血液等が付着したまま乾燥させてしまうと、除去することが困難となる場合がある。
特にシリコンリングははずして洗浄することを推奨する。

【使用上の注意】

1. ステンレスのケースで保護されているが、内部の磁石は割れやすいため落下など衝撃を与えないこと。
2. 本製品の磁石は複雑な磁気の配列になっているため、脱磁器など強力な磁場には近づけないこと。
3. シリコンリングは、時間経過や繰返しの滅菌により滑り止め性能が低下する可能性があるため、適宜交換を推奨する。

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄及び滅菌方法

本品使用後は、速やかに洗浄等により汚染除去を行い血塊等の異物が付着していないこと確認したのち、【使用方法等】欄に示す適切な方法で滅菌を行い保管すること（使用後の長時間放置等によって嵌合部等にある血塊や異物を除去しきれない恐れがある）。

- 1) 洗浄液は、洗浄方法に適したものを選択し、器具に付着した血液及び組織片等を除去する。
- 2) 超音波洗浄装置を使用して洗浄を行う場合は、他のものと接触しないように設置してから行うこと。
- 3) 洗浄後は腐食防止のため、速やかに乾燥すること。
- 4) 滅菌方法については、滅菌装置の添付文書〔取扱説明書〕を必ず参照すること。
- 5) 滅菌済の状態で保管する場合、各医療機関により検証され確認された滅菌条件及び保管条件により有効保管期間の管理をし、再汚染を防ぐこと。
- 6) 強アルカリ、強酸性の洗浄剤や消毒剤は器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。

2. 点検

使用前に器具が正常に作動することを点検すること。

【製造元】

プロスパー株式会社
〒945-1355 新潟県柏崎市大字軽井川 2028 番地 6
TEL 0257-24-5277