

SE *Spherical Extended-view* **mirror**

脳神経外科用手術器具 SEミラー



view easily

made in Japan

S&Brain


マイクロ手術時の術野の死角を観察可能。

- 狭い術野でも小ぶりのミラーで進入可能
- ステンレスの鏡面仕上げでクリアな画像
- ワイドに見える球面タイプと視認し易いフラットタイプ

球面タイプ

SE01
SEミラー-A (球面) 3×5mm

spherical type

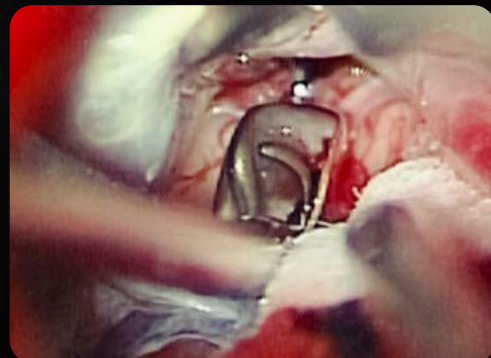

未破裂内頸動脈瘤
2本のクリップで残存ネックが無い事を確認

JA愛知厚生連 海南病院
脳血管外科部長 遠藤 乙音 先生

平面タイプ

SE01F
SEミラー-A (平面) 3×5mm

flat type



左顔面痙攣のMVD
小脳片葉の内側で顔面神経の圧迫血管を確認

水戸ブレインハートセンター
院長 畑山 徹 先生

SE Spherical Extended-view mirror

2 handles

術式、術者の好みに合わせて2種類のハンドルを用意 ■

ワーキング長を可変できる脱着式 ■

straight

SE-05HS

SEミラー ハンドル (ストレート、全長:106mm)



bayonet

SE-05HB

SEミラー ハンドル (バイオネット、全長:127mm)





■ 脱着ダイヤルを回してミラーを接続。容易にワーキング長を可変できます。



SEミラーユニバーサルアダプター

■ SEミラーを頭蓋固定器に繋げて、フリーハンドで使用できます。

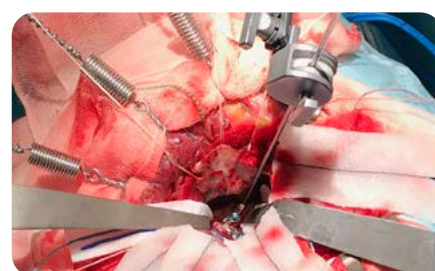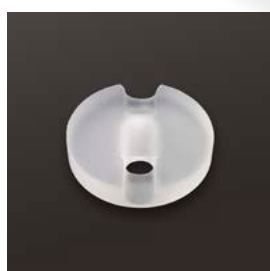

SE-04

SEミラー ユニバーサルアダプター

直径:14mm 厚み:3mm

SEミラーの取扱いについて

本品のご使用については、下記の内容に従ってください。

1. 術中

- ・ミラー表面は傷つき易いため、他の機器との接触には十分注意して下さい。
- ・他の機器との接触を避けるために、専用ケースでのご使用を推奨します。
- ・術野にミラーを挿入した際、温度差によりミラー表面に曇りが生じます。その場合は吸引管で吸い取るか、生食をかけるなどをして曇りを除去して下さい。
- ・曇りを抑える為に、使用前に温生食に浸す事を推奨します。
- ・ミラー表面に血液、組織が付着した際には、目が細かく柔らかいガーゼか下記の不織布による拭き取りを推奨します。

＜推奨品＞ 滅菌スコープワイパーX（オオサキメディカル株式会社）
トレシー（東レ・メディカル株式会社）



2. 洗浄

本品使用後は出来るだけ早く以下の手順で洗浄して下さい。

- ・目が細かく柔らかい布か柔らかい不織布等を使用して、血液や組織の付着を除去して下さい。特にミラー表面に傷があるかどうかの確認には注意を払って下さい。
- ・アルカリ酵素洗浄液及び超音波洗浄器を使用することに問題はありますが、ミラー表面の保護の為に専用ケースを使用する事を推奨します。
- ・血液等の付着がないか目視にて確認し、付着が無くなるまで洗浄を繰返して下さい。

3. 滅菌方法

- ・オートクレーブ、プラズマ、EOG滅菌が可能です。

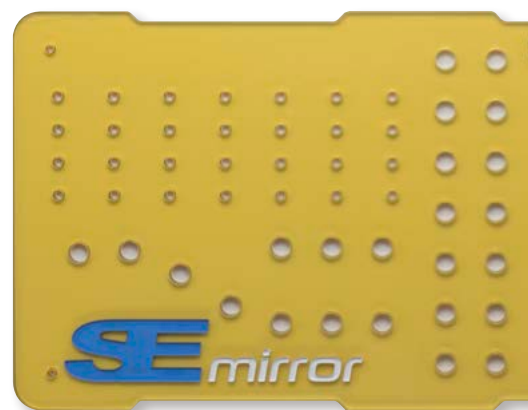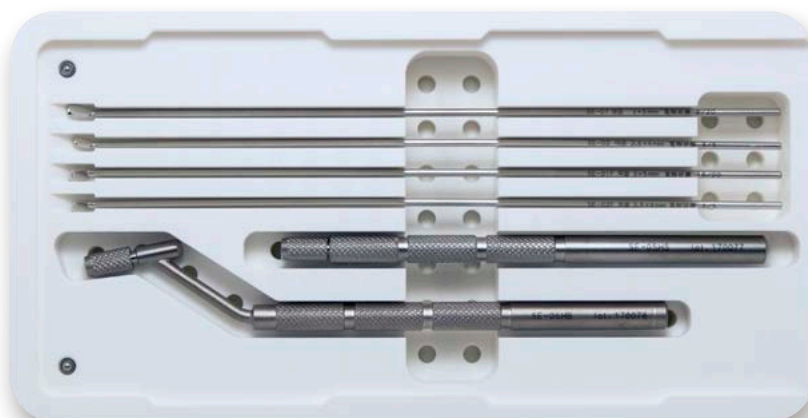

製品一覧

品番	製品名	JANコード
SE-01	SEミラー-A（球面）3×5mm	4573198958133
SE-02	SEミラー-B（球面）2.5×4mm	4573198958058
SE-01F	SEミラー-A（平面）3×5mm	4573198958065
SE-02F	SEミラー-B（平面）2.5×4mm	4573198958072
SE-03F	SEミラー-C（平面）4×7mm	4573198958126
SE-04	SEミラー ユニバーサルアダプター	4573198959864
SE-05HS	SEミラー ハンドル（ストレート、全長：106mm）	4573198958089
SE-05HB	SEミラー ハンドル（パイオネット、全長：127mm）	4573198958096
SE-06	SEミラー ケース	4573198958102

販売名：SEミラー
一般的名称：脳外科用鏡
医療機器届出番号：15B1X10002000003

取扱代理店

製造販売元
プロスパー株式会社
〒945-1355 新潟県柏崎市軽井川2028番地6
TEL.0257-24-5277 FAX.0257-24-8620

販売元
エス・アンド・ブレイン株式会社
〒279-0012 千葉県浦安市入船1-5-2 プライムタワー新浦安1201
TEL.047-316-0517 FAX.047-316-0518