

SP

Neurosurgery
Power Equipments

Motor Drill G2

コードレス穿孔器 SPモータードリル



more compact
more powerful

made in Japan

S&Brain

手術室でも、救急外来でも。

G2

Evolution

進化した第2世代

充電式のコードレスドリルで、場所を選ばず、手早くより安全な穿

battery pack

高出力で稼働時間が長いリチウムイオンを採用。
(1回の充電で複数回の手術が可能)

2step trigger

G2 ロングトリガーを採用し、操作性が向上。

battery switch

最初の引き幅2mmでバッテリーオン。

- バッテリーの消耗が軽減されます。
- 意図せずトリガーが押された時などの不用意な回転を抑えることが出来ます。
- バッテリーの保護回路が働いた際も毎回リセットが出来ます。

variable switch

トリガーの引き幅に応じて回転数の調整が行われ、安全で正確なスピードコントロールが可能。

design shape

コンパクト且つハンドリングの良い形状で、術中の操作性を上げ、術者のストレスを軽減。

G2 シェイプアップと軽量化で、ハンドリング性が向上。
(握り部径:30% less、総重量:25% less)

high torque motor

力強く静粛性の高いブラシレスモーターを採用。

G2 従来比1.5倍のトルクでパワーアップ。



SP Neurosurgery Power Equipments

Motor Drill G2

孔術が可能です。

SPD03

SPモータードリル バッテリーパック

- 出力電圧：28V 容量：7.3Wh



ACアダプター (付属品)
LEDランプ付

SPD05

SPモータードリル 充電器

- 充電時間：約1時間

LEDランプで充電状態が確認できます。

	状 態	残量40%未満	残量40%以上
バッテリーパック	残量確認ボタン押下時、および充電中	消灯	●
	充電完了時		消灯
ACアダプター	充電中	●	
	充電完了時		●

※ 残量確認ボタンを1秒以上押しLEDが消灯した後、再度残量確認ボタン押下にて残量表示となります。



SPD02

SPモータードリル

- 最大回転数：1,150 rpm (最大)
※任意の最大回転数の設定が可能です。

ハドソンチャックの刃先が装着可能です。

SPモータードリルの取扱いについて

本品使用後は、できるだけ早く以下の手順に従って洗浄・滅菌を行って下さい。


1. 洗浄

- ・流水で洗浄を行い、必要に応じて医療用中性洗剤又はアルコールを湿らせた清潔な柔らかい布で、機器に付着した血液及び組織片等を除去する。
- ・再度、蒸留水又は滅菌水を湿らせた清潔な柔らかい布でふくこと。
- ・清潔な乾いた布で、機器を拭いて乾かすこと。
- ・本品は防水機能を有してはいるが、超音波洗浄装置等の洗浄装置に浸漬して使用しないこと。
- ・強アルカリ、強酸性の洗剤や消毒剤は器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
- ・洗浄後は腐食防止の為、速やかに乾燥すること。

2. 推奨滅菌方法

- ・本品はプラズマ滅菌及びEOG滅菌が可能です。※高圧蒸気滅菌は行わないで下さい。

SPモータードリルセット 標準構成

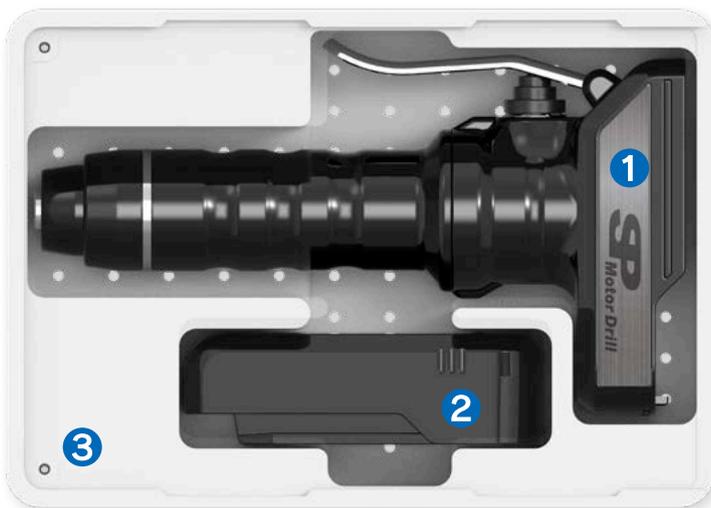

- ① SPモータードリル
- ② SPモータードリル バッテリーパック
- ③ SPモータードリル ケース

ユニバーサルドリルアタッチメント (別売品)



- 6mm径までのドリルビットの把持・穿孔が可能

製品一覧

品番	製品名	JANコード
SPD01	SPモータードリルセット	4573198958003
セット内容 SPD02:1台 SPD03:1台 SPD04:1台 SPD05:1台		
SPD02	SPモータードリル	4573198958010
SPD03	SPモータードリル バッテリーパック	4573198958027
SPD04	SPモータードリル ケース	4573198958034
SPD05	SPモータードリル 充電器 (ACアダプター付属)	4573198958041

販売名：SPモータードリル
届出番号：15B1X10002000002

品番	製品名	JANコード
SPD102	ユニバーサルドリルアタッチメント	4573198958727

一般的名称：手術用ドリルアタッチメント
届出番号：15B1X100020000035

取扱代理店

製造販売元

プロスパー株式会社

〒945-1355 新潟県柏崎市軽井川2028番地6
TEL.0257-24-5277 FAX.0257-24-8620

販売元

エス・アンド・ブレイン株式会社

〒279-0012 千葉県浦安市入船1-5-2 プライムタワー新浦安1201
TEL.047-316-0517 FAX.047-316-0518